

Chodítka a invalidní vozík 2 v 1

č. výrobku 138 528 229

Příručka



1. Před použitím	
1.1. Zamýšlené použití	3
1.2. Indikace	3
2. Bezpečnostní pokyny	3
3. Montážní návod	3
4. Komponenty chodítka	4
5. Postup montáže	4
5.1. Jednotlivé díly	4
5.2. Montáž.....	5
5.3. Rozbalení/složení.....	6
5.4. Montážní návod (pokračování).....	7
6. Obsluha brzd	8
6.1. Nastavení brzd	8
7. Čištění	9

8. Péče a údržba & Vaše povinnosti	9
9. Skladování a přeprava	10
10. Specifikace	10
11. Charakteristika	10
12. Předání	10
13. Symboly	11
14. Likvidace	12
15. Záruka	12

1. Před použitím

- Opatrně odstraňte všechny obaly. Vyhněte se použití nožů nebo jiných ostrých předmětů, které by mohly poškodit povrch výrobku.
- Provéřte výrobek, zda nejeví viditelné známky poškození. Pokud nějakou chybu najdete nebo máme na nějakou chybu podezření, výrobek nepoužívejte, ale obraťte se na svého dodavatele.

1.1. Zamýšlené použití

Vaše chodítko je navrženo tak, aby vám pomáhalo při chůzi a nošení malých nákupů v přiložené tašce. Chodítko je určeno pro použití uvnitř vašeho domova i mimo něj. Pokud chodítko nepotřebujete, můžete jej jednoduše složit a uložit jej na další použití.

1.2. Indikace

Pro pacienty, kteří při chůzi a nošení malých věcí potřebují pomoc.

2. Bezpečnostní pokyny

- Tento přístroj musí být nainstalovaný pouze od kompetentních osob.
- Taška byla navržena speciálně pro vaše chodítko. Používejte tedy pro své chodítko pouze tuto určenou tašku. Nepoužívejte nebo nekombinujte k použití žádné sáčky nebo koše od jiného výrobce.
- Chodítko smí být použito jen na normálním chodníku nebo doma. Nemělo by být používáno na nerovném terénu nebo nerovném povrchu. Používání chodítka na těchto površích může vážně ohrozit bezpečnost a způsobit neopravitelné poškození vašeho chodítka.
- Hraniční hmotnost je 120 kg. Nepřekračujte tuto uvedenou hraniční hmotnost – mohlo by to pro uživatele představovat nebezpečí.

POZNÁMKA

Prosíme Vás, abyste kontaktovali nás, případně příslušné úřady, pokud Vám v souvislosti s použitím tohoto výrobku vyskytlo života ohrožující onemocnění nebo zranění nebo dlouhodobé tělesné poškození, nebo pokud musíte být z důvodu použití našeho výrobku léčeni nebo hospitalizováni nebo se vaše hospitalizace musela prodloužit.

3. Montážní návod


Opatrně odstraňte všechny obaly, včetně kartonových obalů zakrývajících vroubkovanou část brzdy. Výrobek dobře prověřte, zda není poškozený nebo nemá nějaké zjevné nedostatky.

VAROVÁNÍ



Chodítka okamžitě vyřadte z provozu, pokud se jedno z kol obtížně otáčí nebo již není bezpečně připojeno k rámu, nebo pokud máte podezření na poškození nebo na jinou závadu.

4. Komponenty chodítka

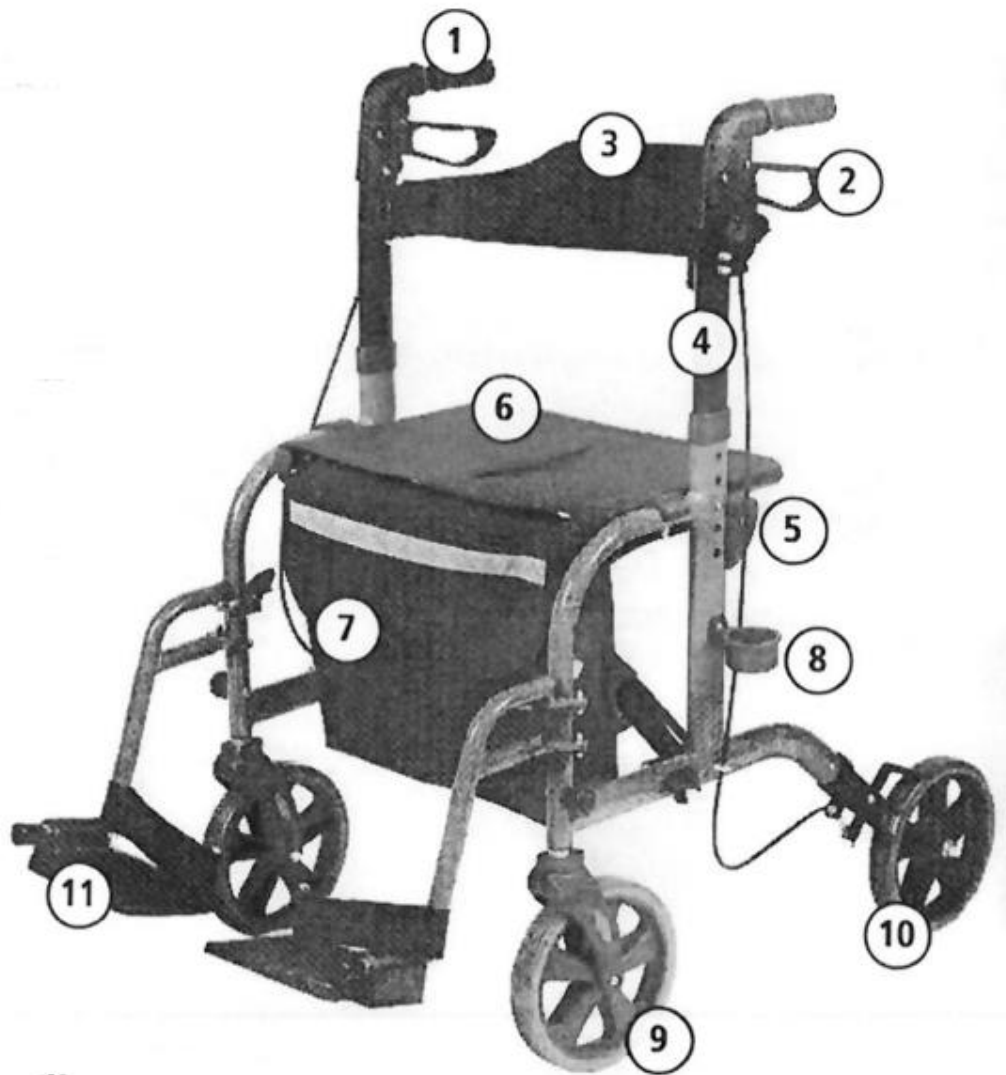

1. rukojeť
2. brzdová páka
3. opěradlo
4. výškově nastavitelné rukojeti

5. knoflík pro nastavení výšky
6. sedadlo
7. nákupní taška
8. držák na hůl
9. přední kolo
10. zadní kolo
11. stupačky


5. Postup montáže

5.1. Jednotlivé díly



5.2. Montáž


Obrázek 1

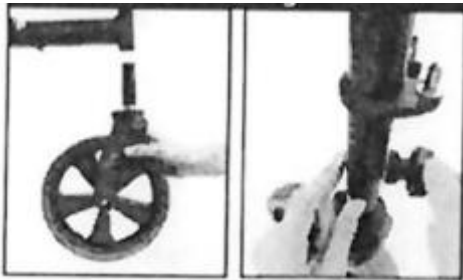

Krok 1:

Nasaďte přední kolo do výklenku na přední straně rámu. Provlékněte šrouby skrz otvory na chodítku, připevněte tlačítko pro upínání hvězdicové hlavy a pevně jej utáhněte. Pro upevnění druhého kola opakujte krok 1 (viz obrázek 1).

Obrázek 2

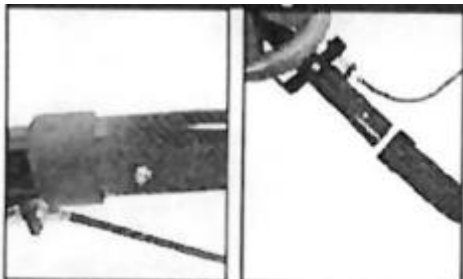

Krok 2:

Nasaďte zadní kolečko do výklenku na zadní straně rámu a stiskněte přitom pojistný čep.

Pojistný čep vyskočí nahoru, pokud je kolo dobře upevněno. Po namontování druhého zadního kola opakujte krok 2 (viz obrázek 2).

Při připevňování zadních kol dejte pozor na to, aby se kola nacházela na vnější straně rámu a brzdové táhlo na spodní straně.

Obrázek 3




Krok 3:

Rukojeti připevněte stisknutím pojistného čepu na základně sestavy u rukojeti a zasunutím do výklenku na hlavním rámu. Opakujte proces na druhé straně. (viz obrázek 3).

Při nasazování jednotky rukojeti dejte pozor na to, že rukojeť směřuje k zadním kolečkům. Ergonomická ploutev na rukojeti by měla směřovat dovnitř.

Výška rukojeti lze nastavit podle různých uživatelů. Stiskněte zajišťovací nýt na hlavním rámu a vytáhněte rukojeť nahoru nebo dolů. Jakmile se rukojeť pohybuje, nechte tlačítko uvolněné. Přitom bude automaticky nastavena nejbližší možná výška. Opakujte tento proces, dokud nedosáhnete požadované výšky. Ujistěte se, že jsou obě rukojeti nastaveny na stejnou výšku (viz obrázek 3).

Obrázek 4

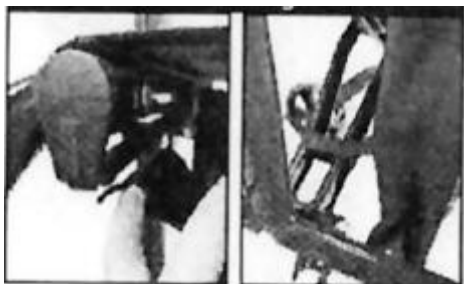

Krok 4:

Nasuňte poutka nákupní tašky na háčky po stranách sedačky. Tašku připevněte dlouhými pásky na suchý zip z plátna ke sloupkům hlavního rámu (viz obrázek 4).

Obrázek 5




Krok 5:

Připevněte držák tyče k základně. Základna držáku tyče je umístěna na levé spodní straně rámu. (viz obrázek 5).

5.3. Rozbalení/složení


Obrázek 6

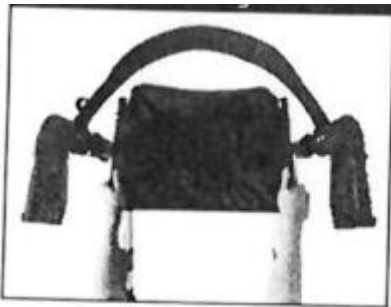

Krok 6:

Chodítko rozložíte zatlačením na obě strany rámu sedačky.


Obrázek 7

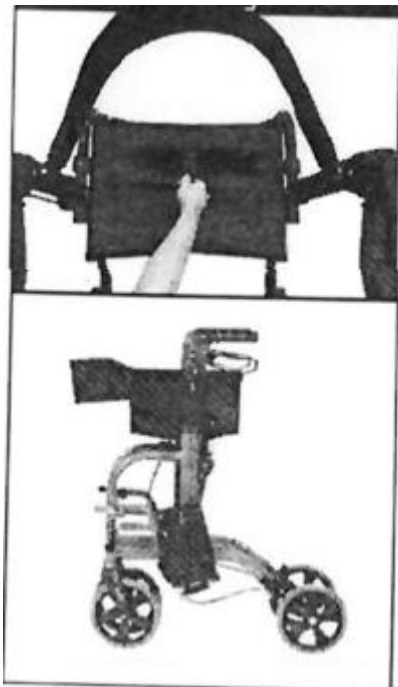

Krok 7:

Pro složení vytáhněte sedačku nahoru pomocí černé rukojeti na desce sedátka (viz obrázek 6). Chodítko lze nyní zcela složit (viz obrázek 7).

Obrázek 8

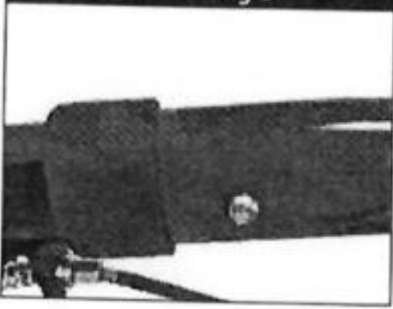


DŮLEŽITÉ:

Před použitím se ujistěte, že jsou všechny bezpečnostní pojistné čepy zcela usazeny (viz obrázek 8).

5.4. Montážní návod (pokračování)

Obrázek 9

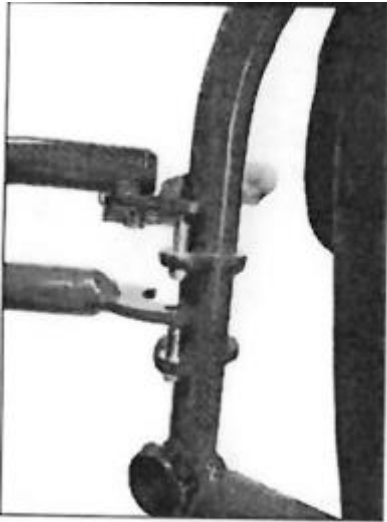

Krok 9:

Chcete-li připevnit stupačky, vyrovnejte otvory v držácích stupaček s výstupky na předních nohách, a spusťte je dolů (viz obrázek 9).

Obrázek 10



Otočením stupaček dovnitř je uzamkněte (viz obrázek 10).

Obrázek 11



Když odpružený zámek zapadne na místo, stupačky se zablokují (viz obrázek 11).

6. Obsluha brzd

Obrázek 12



1. Chcete-li chodítko zastavit, jemně sešlápněte obě brzdy současně (viz obrázek 12), abyste chodítko zpomalili a zastavili.


Obrázek 13



2. Brzy vašeho chodítka mají funkci uzamčení (viz obrázek 13). Pro aktivaci uzamykání funkce stiskněte současně obě brzdy směrem dolů. Ucítíte velmi jemné cvaknutí brzdy. Vaše brzdy jsou teď v „zablokované“ poloze.
3. Pro uvolnění jednoduše zatáhněte za brzdou. Uslyšíte jemné cvaknutí, když se zámek uvolní.

6.1. Nastavení brzd

Obrázek 14

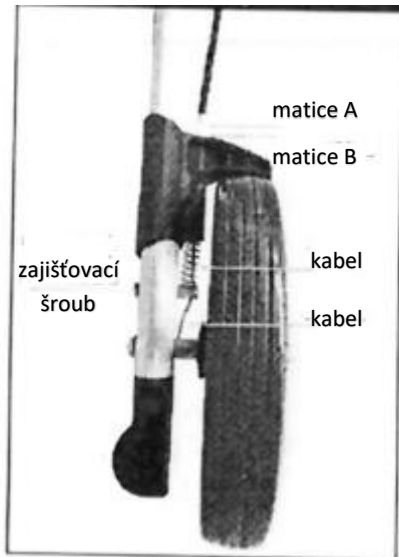

Brzdový systém chodítka se musí pravidelně seřizovat. Chcete-li seřídit brzdy, povolte matici B a poté našroubujte nebo odšroubujte matici A. Po seřízení matici B opět utáhněte. Pokud je potřeba další seřízení nebo nastavení, povolte zajišťovací šroub a poté pomocí kleští stáhněte kabel asi o milimetr dolů. Znovu utáhněte zajišťovací šroub. Brzdy lze dále seřizovat povolením matice B a šroubováním/povolováním matice A jako dříve (viz obrázek 14).

7. Čištění

Chodítka by měla být vyčištěna, pokud máte pocit, že je čištění potřeba. Udržujte vaše chodítka čisté tím, že je otřete vlhkým, měkkým hadříkem a jemným nebo neagresivním čistícím prostředkem. Chodítka vysušte měkkým hadříkem nebo je nechte uschnout na vzduchu. V žádném případě nepoužívejte drsné čistící prostředky nebo prostředky na bázi rozpouštědla, jako je například AJAX, nebo brusiva, která by mohla chodítka nenapravitelně poškodit tak, že by již nemohla být používána. Kromě toho vede špatné čištění ke ztrátě záruční lhůty.

8. Péče a údržba & Vaše povinnosti

1. Chodítka používejte pouze k účelu, k jakému bylo určeno – jako pomůcku při chůzi. Chodítka smí být použita jen na normálním chodníku nebo doma. Nemělo by být používáno na nerovném a nebezpečném povrchu. Používání chodítka na těchto površích může vážně ohrozit bezpečnost a způsobit neopravitelné poškození vašeho chodítka.

2. Prověřte, zda fungují všechna kolečka a skládací mechanismus a zda se všechna kolečka volně pohybují. Dejte obzvláště pozor na přední kolečka a ujistěte se, že se mohou volně a bez překážek otáčet, a že jsou pevně připevněna na rámu.

VAROVÁNÍ



Chodítko okamžitě vyřadte z provozu, pokud se některé z kol obtížně otáčejí nebo není bezpečně připevněno k rámu, nebo pokud máte podezření na poškození nebo na jinou závadu.

3. Nemontujte na chodítko žádné díly ani příslušenství, které byly vyrobeny od jiné firmy. Toto vede ke ztrátě záruky a může být ohrožena vaše bezpečnost.
4. Doporučujeme Vám, chodítko denně nebo při obavách vizuálně kontrolovat (další informace naleznete v kapitole „Předávání“). Je vyžadována vlastní kontrola 1x za měsíc.
5. Měsíční kontrola:
 - Prověřte, zda jsou pojistné nýty správně upevněny.
 - Ujistěte se, že nejsou žádné komponenty volné.
 - Prověřte nastavení vašich brzd (další informace najdete v kapitole „Předávání“).
 - Prověřte kolečka (další informace najdete v kapitole „Předávání“).
6. Péče o kovové spoje:
Na všechny kovové spoje používejte každý rok vodní dispergátor, jako je WD 40.

9. Skladování a přeprava

Pokud chodítko nepotřebujete, můžete jej jednoduše složit a uložit na příští použití.



teplotní hranice: -20 °C až + 60 °C



hranice pro vlhkost: 45 % - 60 % RH

10. Specifikace

celková délka (mm)	980
celková šířka (mm)	640
výška rukojeti (mm)	900 - 1000
sedací plocha Š x H (mm)	440x312
přední kolo (mm)	200
zadní kolo (mm)	200
netto hmotnost (kg)	9,42
brutto hmotnost (kg)	10,37
hranice hmotnosti (kg)	120

11.Charakteristika

- uživatelsky přívětivé smyčkové brzdy s aretací
- jednoduché nastavení brzd
- měkká a pevná plastová kola
- otočná přední kola
- skládací zamykací mechanismus
- výškově nastavitelné
- ergonomické rukojeti ke snížení tlaku
- držák na vycházkovou hůl

12.Předání

Pokud tento výrobek předáváte nebo se jej chystáte předat, zkontrolujte prosím před předáním pečlivě všechny komponenty na bezpečnost.

To zahrnuje:

- ohnuté nebo poškozené trubky nebo praskliny ve spojích trubek
- uvolněné nebo opotřebované svorky ve tvaru podkovy
- dlouhé nastavovací otvory
- volné rukojeti
- uvolněná nebo opotřebovaná kolečka nebo připevnění koleček (pokud jsou namontována)
- hladké, opotřebované nebo rozdělené objímky (gumové hroty)

Podle potřeby vyměňte všechny uzamčené, chybějící nebo poškozené díly. Máte-li pochybnosti, nepředávejte přístroj ani jej nepoužívejte a okamžitě kontaktujte svého dodavatele se žádostí o zákaznický servis.

13.Symbols



CE – označení



číslo výrobku



označení šarže



sériové číslo




číslo globální obchodní položky



pozor



datum výroby

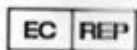


autorizovaný zástupce v Evropském společenství/Evropské unii



dovozce



uchovávejte v suchu

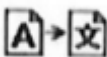

překlad



teplotní hranice



vlhkost vzduchu – hranice



jedinečné identifikační číslo



lékařský výrobek



věnujte pozornost příručce



hmotnostní hranice



výrobce



prodejní partner



nahoru



opatrné zacházení

14.Likvidace

Na konci životnosti musíte chodítko zlikvidovat podle místních ekologických předpisů.

15.Záruka

Na tento výrobek se vztahuje záruka 12 měsíců od data nákupu na výrobní vady. Nesprávné použití nebo poškození se na záruku nevztahují. Tato záruka nemá vliv na vaše zákonná práva.

