

# Elektronická lupa

č. výrobku 6134621

## Příručka

*Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.*

### Úvod

Tento přístroj byl testován a splňuje limity pro digitální přístroj třídy B. Tyto normy jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti.

### Rozsah dodávky



Elektrická lupa



TV-Kabel



USB-Kabel




Přepavní taška



Čištící hadřík

### Pokyny k bezpečnosti a údržbě



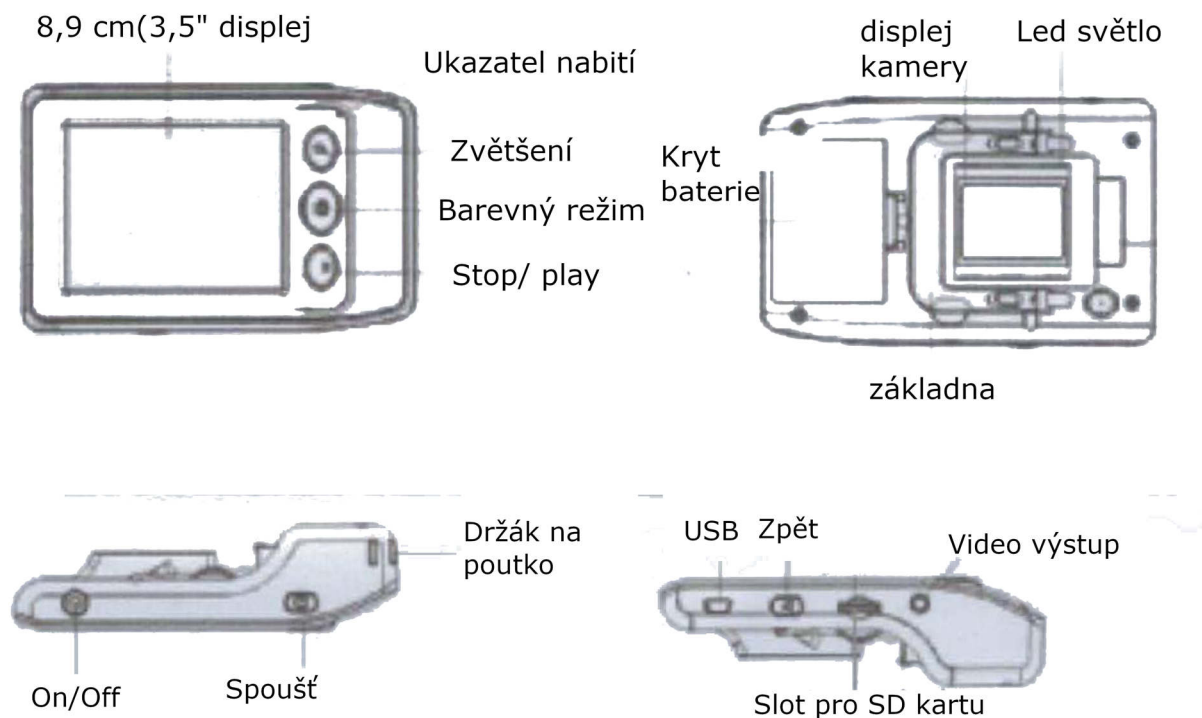



1. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte všechny pokyny v této příručce.
2. Nepokoušejte se sami opravit elektronickou lupou, ani neotevírejte kryt. Tento přístroj neobsahuje žádné součásti, které jsou opravitelné uživatelem.
3. S elektronickou lupou vždy pracujte při okolní teplotě mezi 0 °C a max. 45 °C.
4. Elektronickou lupou skladujte na suchém a chladném místě při normální pokojové teplotě.




## Obsluha

1. Pro zapnutí elektronické lupy stiskněte ON/OFF.
2. Úplně vytáhněte základnu lupy, aby mohla být lupa nastavena s maximálním dosahem.
3. Lupu umístěte rovně na text, který chcete číst.
4. Pomalu pohybujte lupou doprava až do konce řádku. Potom přesuňte lupu dozadu a dolů na další řádek textu.
5. Chcete-li změnit zvětšení (2x až 25x), stiskněte tlačítko se symbolem lupy.
6. Chcete-li změnit barvy na obrazovce, několikrát stiskněte tlačítko pro režim barev, dokud nenajdete kombinaci barev, která nabízí nejlepší způsob, jak přečíst text.
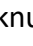
## Ovládání

1. Snímek: Vložte paměťovou kartu SD do slotu pro kartu. Stisknutím tlačítka  můžete nyní pořídit snímek aktuálně zobrazeného obrázku na displeji. Fotografie se automaticky uloží na SD kartu.
2. Statický obrázek: Podržte stisknuté tlačítko  a můžete „zmrazit“ obrázek aktuálně zobrazený na displeji. To může usnadnit čtení nebo pohled na konkrétní místo. Pro pokračování tlačítko uvolněte.
3. Opakování: Stisknutím tlačítka  zobrazíte dříve pořízený snímek. Stisknutím tlačítka  zobrazíte další stránku. Stisknutím tlačítka  obrázek zvětšíte nebo zmenšíte.
4. Zvětšení / zmenšení: Stisknutím tlačítka se symbolem lupy zvětšíte a zmenšíte text. Zvětšení se provádí v krocích: 2krát, 4krát, 8krát, 16krát a 25krát.
5. Režim barev: Tlačítkem  pro režim barev vyberte mezi 8 různými barevnými režimy.
6. Zapnutí / vypnutí: Chcete-li přístroj zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko ON/OFF. Pokud po dobu 3 minut nepoužijete žádné tlačítko, přístroj se automaticky vypne. Pokud chcete pokračovat ve čtení, musíte lupu znovu zapnout.
7. Připojení USB: Připojte elektronickou lupu k počítači pomocí dodaného kabelu USB a lupu zapněte. Nyní můžete pořízené snímky uložit do počítače.

8. Video výstup: Pokud je pro vás displej lupy příliš malý a chcete zobrazit text na větší obrazovce, můžete přístroj připojit k televizoru pomocí dodaného televizního kabelu. Postupujte podle obrázku níže:

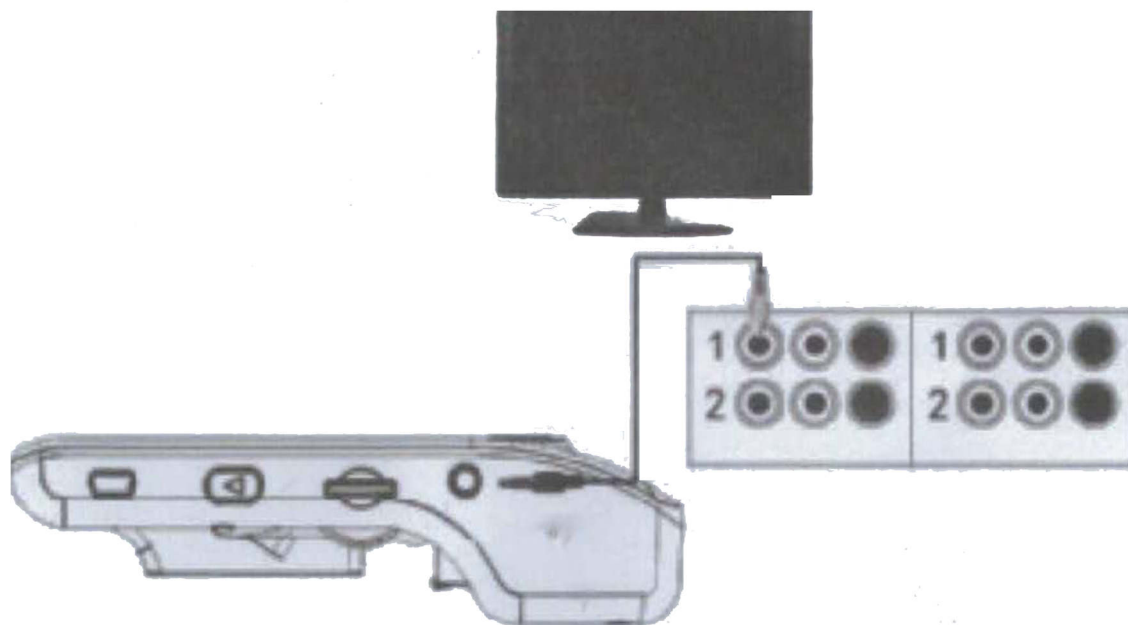

### Technická data

- Zvětšení: 2x – 25x
- Displej: 8,9 cm (3,5 ") TFT LCD
- Režim barev: plně barevné, černé a bílé, černé na bílé, bílé na černé, modré na bílé, bílé na modré, žluté na modré, modré na žluté
- Připojení úložiště: slot na kartu SD, podporuje SD karty do 32 GB
- Připojení videa: výstup AV
- Kapacita akku: 3,7 V, 1000mA/h
- Ukazatel stavu nabití: ano
- Obrazový senzor: 1 / 6,5 "VGA
- Statický obrázek: ON/OFF
- Externí televizní systém: PAL/NTSC
- Automatické vypnutí: po 3 minutách bez použití tlačítka
- Rozměry: 128 x 78 x 34 mm
- Hmotnost: 145 g

## Poradce při potížích

Problém:	Řešení
Displej zůstává černý	Proveďte zda, je přístroj zapnutý.
	Proveďte, zda nejsou baterie příliš slabé.
	Ujistěte se, že objektiv směřuje ke čtečce.
Přístroj nejde zapnout	Baterie jsou vybité. Baterie okamžitě nabijte.
Obraz na displeji je tmavý nebo zkřivený(zkreslený)	Ujistěte se, že je lupa rovně na stránce, kterou chcete číst.
	Ujistěte se, že je základna lupy natažena do maximální polohy.
Špína nebo fleky na displeji	Vyčistěte displej a objektiv (objektiv je mezi dvěma dolními LED diodami).
Text je příliš malý.	Stiskněte tlačítko pro zvětšení.