

REHAFORUM MEDICAL

Actimo® Home – Chodítko

- ⚠ Před prvním sestavením, nastavením nebo použitím chodítka si pečlivě přečtěte celý návod na použití. Návod na použití uschovejte, aby byl k dispozici pro pozdější použití.

Zamýšlené použití: Chodítko je pro domácí použití, které pomáhá lidem s pohybovými problémy a problémy s chůzí. Disponuje zásobníkem a sítí pro přepravu nádobí a předmětů pro každodenní potřeby.

Montáž/Návod: S montáží vám rád pomůže váš prodejce nebo ošetřující personál

1. Před vybalením zkontrolujte krabici, zda není poškozená. Pokud je poškozen obsah, okamžitě kontaktujte svého prodejce. Chodítko je dodáváno ve stavu připraveném k použití, smontované odborným prodejcem nebo podpůrným personálem a jsou zkontrolované funkce.
2. Vyjměte chodítko a držte jej za rukojeť. Chodítko rozložte zatlačením na horní příčnou černou vzpěru. Zkontrolujte spodní vzpěru, abyste se ujistili, že je aktivační mechanismus plně rozvinut. Zavedte dvě přední tyče, na kterých jsou přední kola, jednu po druhé do tyčí rámu (viz obrázek). Zatlačte na malé knoflíky na boku. Ty musí slyšitelně zacvaknout a musí být viditelné na boční straně tyče rámu.
3. Dvě tyče, na kterých jsou umístěna zadní kola s brzdami, vložte do zadní části rámu (viz obr.). Stiskněte malá tlačítka na vnější straně. Ty musí slyšitelně zacvaknout a musí být viditelné na boční straně tyče rámu. Ujistěte se, že brzdová lanka nejsou přiskřípnutá nebo zkroucená!
4. Chcete-li nastavit výšku rukojeti a podpěry, povolte na rámu dva křídlové šrouby otáčením proti směru hodinových ručiček (viz obrázek). Odstraňte dva šrouby - jeden po druhém, a držte rukojeť na místě. Nastavte výšku (viz obrázek) a prostrčte zpět dva šrouby skrz otvory zevnitř v rámu. Oběma šrouby pevně otočte ve směru hodinových ručiček.
5. Chcete-li připevnit síť, otevřete suché zipy, umístěte je kolem černého rámu a zapněte je. Vložte poličku a jemně zatlačte podnos na rám.
6. Chcete-li zabrzdit, zatáhněte za spodní páčku směrem k řídítkům. Chcete-li brzdu zablokovat, zatlačte brzdovou páčku dolů. Pro uvolnění brzdy zatáhněte směrem nahoru za brzdovou páčku.
7. Chcete-li chodítko složit, vyjměte podnos a síť. Uchopte chodítko za rukojeť se zapnutou brzdou a vytáhněte nahoru spodní černou vzpěru (viz obr.).

⚠ Bezpečnostní pokyny

1. Vadné chodítko nepoužívejte!
2. Chodítko nepoužívejte, pokud jsou brzdy vadné a před každým použitím je vyzkoušejte, zda fungují!


3. Chodítko není invalidní vozík nebo dopravní prostředek, ale pouze pomůcka pro chůzi.
4. Podnos a síť pod chodítkem mohou být zatíženy maximálně 5 kg.
5. Pravidelně kontrolujte, zda není chodítko opotřebované a poškozené. Poškozené díly nechte vyměnit u odborného prodejce.
6. Zkontrolujte dotažení šroubů a správné nastavení výšky.
7. Chodítko Actimo® Home je určeno pro použití v uzavřených místnostech. Maximální nosnost: 100 kg.

Čištění

Chodítko byste měli čistit nebo dezinfikovat v pravidelných intervalech (povinně při změně uživatele). Používejte jemnou, neabrazivní mýdlovou vodu a měkký hadřík. Dezinfikovat můžete běžně dostupným prostředkem podle návodu výrobce, například s Descosept AF. Nepoužívejte abrazivní nebo žíravé čisticí prostředky ani vysokotlaké nebo parní čističe! Ujistěte se, že se na pneumatikách nebo brzdách neusazují žádné nečistoty. Ty lze odstranit měkkým kartáčem a teplou vodou.

Údržba

Chodítko Actimo® Home je bezúdržbové.

Funkční chyba:  Pokud zaznamenáte snížení brzdného výkonu nebo jsou-li kola tuhá, kontaktujte specializovaného prodejce.

Zjistíte-li na rámu poškození nebo rez, informujte ihned odborného prodejce a poškozené chodítko nepoužívejte!

Kontraindikace

Použití chodítka je nevhodné při zhoršeném vnímání, při těžkých poruchách rovnováhy, sníženém vidění, ztrátě končetin na obou pažích a při poškození kloubů na pažích.

Rozsah dodávky

chodítko Actimo® Home
podnos
síť
návod na použití

Technická data/rozměry a hmotnost

hmotnost: 6,2 kg; materiál: hliníkový rám (antikorozi - anodická oxidace), rukojeť EVA (ethylen vinyl acetát).

kola: PVC 6"

maximální nosnost: 100 kg

šířka: 58 cm

hloubka: 60 cm

nastavitelná výška: cca 76 - 86 cm

rozměry chodítka ve složeném stavu: cca 52 x 51 x 21 cm

vnější rozměry (balení): cca 54 x 53 x 23 cm

Záruka

Záruční doba je 24 měsíců a vztahuje se na všechny vady výrobku, které prokazatelně vznikly výrobními nebo materiálovými vadami.

Výrobce

REHAFORUM MEDICAL

Daimlerstrasse 12a

D-25337 Elmshorn

Tel: (0)4121 4733 12

Fax: (0)4121 4733 23

www.rehaforum.com

info@rehaforum.com