

O TERAPII SOLNÝM AEROSOLEM Při terapii solným vzduchem se inhaluje solný aerosol (složky nano soli rozpuštěné ve vzduchu). Léčebnou metodu lze použít téměř u všech typů onemocnění dýchacích cest a je 100% přírodní, velmi dobře snášená a bez vedlejších účinků. Inhalační solný aerosol působí antibakteriálně a protizánětlivě, dokáže decimovat patogeny na sliznicích, podporuje zkapalňování hlenu a tím usnadňuje vykašlávání. Dokáže zmírnit zánět průdušek, krku a dutin a urychlit hojení. Vdechování solného aerosolu také zvyšuje schopnost plic absorbovat kyslík a má pozitivní vliv na imunitní systém.

INHALO DSI BRONCHIAL INFORMACE O PRODUKTU

INHALO DSI BRONCHIAL obsahuje 5 gramů přírodních, ručně vybranou kamennou sůl ze Salina Pride. Složky a různé poměry: chlorid sodný, hořčík, vápník v jejich přirozeně se vyskytující formě.

Oblasti použití: Rýma s kašlem, senná rýma, astma, bronchitida, CHOPN, suchý kašel, kuřácký kašel a podráždění dolních cest dýchacích obecně, záněty a rány v ústech a krku (po stomatologických operacích, operacích mandlí).

Použití INHALO DSI BRONCHIAL

Orální inhalace (dolní cesty dýchací)

Sejměte ochranný kryt. Obejměte oranžový náustek rty a zhluboka se nadechněte přes přístroj. Po vdechnutí dejte INHALO DSI BRONCHIAL od úst a vydechněte opět nosem.



Poznámka: Nevydechujte do přístroje, mohla by se tím v přístroji nastřádat vlhkost a krystaly by se mohly zalepit. Na použití opět nasadte zpět ochranný kryt. **Doporučení:** Před aplikací vypijte doušek vody, aby se zvlhčila ústní sliznice. Bezprostředně po aplikaci hned nepijte, počkejte prosím 5 minut. **Dávkování:** Pro ideální účinnost používejte INHALO DSI BRONCHIAL v denních aplikacích celkem 15 až 20 minut.

Aplikaci si můžete rozdělit po celý den, dle libosti. Doporučujeme 4 sezení rozdělit do dne, každé sezení po 5 minutách. Při akutních respiračních problémech/nachlazení a zápalu alergií můžete denní použití zvýšit až na 30 minut. Po aplikaci budete mít možná v ústech několik minut lehce slanou chuť. Toto je zcela normální a je důkazem toho, že byl vdechován solný aerosol a INHALO DSI BRONCHIAL byl správně aplikován.

Varovné poznámky

- **Nepoužívejte INHALO DSI BRONCHIAL v případě, že máte zápal plic!**
- Při těžkých a chronických onemocnění dýchacích cest, onemocnění srdce nebo vysokém krevním tlaku, stejně tak těhotné ženy, by se měly před použitím poradit se svým lékařem nebo lékárníkem!
- Nepoužívejte přístroj s více lidmi! (riziko infekce!)
- INHALO DSI BRONCHIAL není náhradou za léky a v případě souběžné medikamentózní terapie by se měla inhalace po konzultaci se svým lékařem nebo lékárníkem!

- Dejte pozor na to, aby do přístroje nevnikly žádné kapaliny!
- S přístrojem netřeste nebo jej nenechte spadnout!
- **POZOR: Obsahuje malé díly, které mohou být spolknuty nebo vdechnuty. Hrozí nebezpečí udušení! Uchovávejte výhradně mimo dosah malých dětí! Není vhodné pro děti mladší 2 let! U dětí mladších 5 let doporučujeme při aplikaci dohled dospělé osoby!**

Další informace

- Od prvního použití je přístroj použitelný 90 dní nebo 3 měsíce.
- Skladujte jej v suchu a při pokojové teplotě.
- Na naše stránky se dostanete přes QR kód, který se nachází uprostřed dole.
- Číslo šarže naleznete dole vlevo.
- Tyto informace pro pacienty dobře uschovejte.
- Může se stát, že z kazety níže vypadnou izolované krystalky soli.

Údržba Aby se odstranilo ucpání solnými krystalky, použijte prosím jehlu nebo kancelářskou sponu, aby vzduch mohl opět nerušeně proudit přes filtrační síto. Vnějšek přístroje INHALO DSI BRONCHIAL můžete vyčistit vlhkým, měkkým hadříkem. Díl, který se vkládá do úst či nosu můžete sejmout a vypláchnout teplou tekoucí vodou. Než přístroj znovu sestavíte, nechte jej důkladně oschnout.